

Οδηγίες λήψης και μεταφοράς κλινικών δειγμάτων προς το Εργαστήριο Αναφοράς

Κατάλληλο δείγμα/ τύπος δείγματος για τη διεξαγωγή της εξέτασης

- Υλικό από δερματικές βλάβες/αλλοιώσεις από άτομα που έχουν ενεργές αλλοιώσεις ή εξάνθημα.
 - Το υλικό αυτό μπορεί να είναι από υγρό από τη βλάβη ή από την κορυφή της βλάβης ή από ιστό ή κρούστα από τη βλάβη.
- Υλικό από βιοψία (χωρίς κατεργασία με φορμόλη) ή ξέσματα

Συλλογή, Αποθήκευση και Συντήρηση του δείγματος πριν την αποστολή

- Η συλλογή του δείγματος γίνεται από κάθε δερματική βλάβη/αλλοίωση ξεχωριστά, με ένα αποστειρωμένο στυλεό από νάιλον, πολυεστέρα ή Dacron με πλαστικό, ξύλινο ή λεπτό άξονα αλουμινίου.
- Συνιστάται να μην γίνεται χρήση άλλων τύπων στυλεών πχ από βαμβάκι, διότι μπορεί να προκαλέσουν αναστολή της PCR
- Η τοποθέτηση του δείγματος γίνεται σε ένα διακριτό σωληνάριο συλλογής (δηλαδή, ένα σωληνάριο ανά δειγματοληψία βλάβης) με ευκρινή αναγραφή της θέσης συλλογής/προέλευσης του κάθε δείγματος.
- Τα δείγματα φυλάσσονται στους 2-8°C έως και 7 ημέρες ή στους -20°C και χαμηλότερα έως και 1 μήνα.
- Η κρυοσυντήρηση πρέπει να γίνει το αργότερο μέσα σε μια ώρα από τη συλλογή του δείγματος
- Τα δείγματα που φυλάσσονται στους 2-8°C θα πρέπει να αποστέλλονται στο εργαστήριο εντός 5 ημερών από τη συλλογή τους, ενώ αυτά που φυλάσσονται στους -20°C θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 21 ημερών από τη συλλογή τους.

Υλικό μεταφοράς

- Δεν πρέπει να προστίθεται υλικό μεταφοράς στα δείγματα. Ωστόσο, τα επιχρίσματα που είναι αποθηκευμένα σε γενικό μέσο μεταφοράς ιών, ή ιστός που είναι αποθηκευμένος σε φυσιολογικό ορό είναι κατάλληλα προς εξέταση.